


EXPLORE

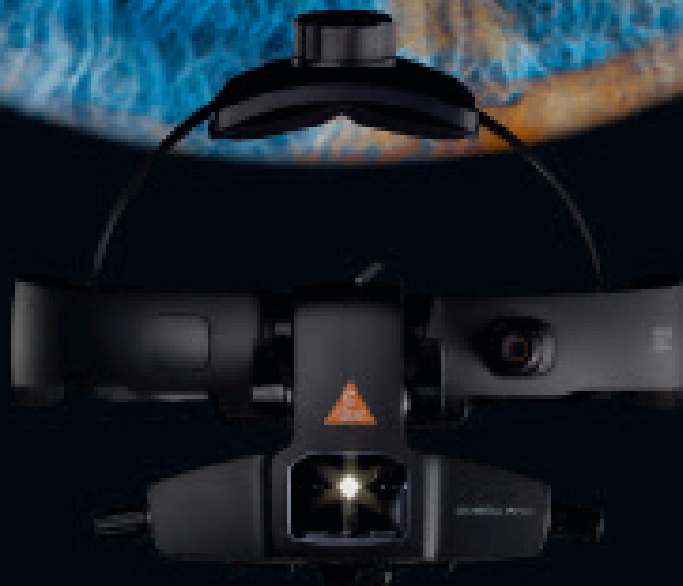

БОЛЬШЕ ОТКРЫТИЙ.  
МЕНЬШЕ ВЕС.

HEINE OMEGA 600 –  
непрямой офтальмоскоп





# HEINE OMEGA 600

непрямой офтальмоскоп премиум-класса

# ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАКОЙ ПРОСТОЙ.

Внутри глаза можно открыть многое. И часто именно крошечные детали имеют большое значение. Вот почему HEINE OMEGA 600 предлагает нашу лучшую оптику, наше самое чёткое изображение и реалистичные цвета. В сочетании с возможностью осмотреть сразу всю сетчатку, включая внешнюю периферию. Это предпосылки для максимально точной диагностики, которая обеспечивает оптимальное лечение пациента.

Мы разработали HEINE OMEGA 600 исходя из этих предпосылок и на основе многих ценных предложений наших пользователей.



HEINE visionBOOST для пациентов с катарактой **обеспечивает ещё более надёжную диагностику** при обследовании пациентов с помутнением оптических сред глаза. Причина: до 20% лучший обзор сетчатки даже у пациентов с катарактой. Это всегда означает идеальную рабочую яркость, как для пациента, так и для пользователя.

HEINE OMEGA 600 – самый лёгкий непрямой офтальмоскоп премиум-класса всех времён. **Чрезвычайно компактный литий-полимерный аккумулятор** очень лёгкий и обеспечивает максимальную производительность. Кабели и электроника полностью интегрированы в шлем, это ещё один шедевр. Открывать больше теперь стало ещё удобнее.

Ну попробуйте надеть HEINE OMEGA 600. Только осторожно: вам больше не захочется его снимать.



# HEINE OMEGA 600: НА МНОГО

Мы сохранили лучшее. И в то же время мы пересмотрели и улучшили практически все. В результате, вероятно, получился самый удобный непрямой офтальмоскоп всех времен, который также определяет новый технологический класс.

## smooth SURFACE

### КОМФОРТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ШЛЕМ

Не требует обслуживания и легко поддается гигиенической обработке благодаря гладкой поверхности smoothSURFACE

### СУПЕР ЛЁГКИЙ ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Время работы обычно 8 часов, в зависимости от используемой яркости.

### ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ ИЛИ БЕЗКРАСНЫЙ ФИЛЬТР

В зависимости от диагностических

### ГЛАДКАЯ, ЛЕГКО ДЕЗИНФИЦИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря smoothSURFACE



# СВЕТОВЫХ ЛЕТ ВПЕРЕДИ

## ПРОЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КОЖАНАЯ ПОДКЛАДКА

Удобна и легко дезинфицируется

## ИНТУИТИВНАЯ БЛОКИРОВКА ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА

Высота, расстояние и угол наклона регулируются

## visionBOOST улучшает обзор сетчатки пациента, даже при прогрессирующей катаракте, до 20%.

Бесступенчатая регулировка яркости LED<sup>HQ</sup>, необходимая Вам и Вашему пациенту: от 3 до 100 % или до 245 % для обследования катаракты.

## ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ЗА СЧЕТ ГЕРМЕТИЧНОВА ОПТИЧЕСКОГО КОРПУСА

Лёгкая гигиеничная обработка благодаря гладкой поверхности smoothSURFACE

## УЛУЧШЕННЫЙ ВИД ИЗ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА, СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АНТИБЛИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Оптимизировано для нашего уникального, не требующего обслуживания LED<sup>HQ</sup>

## ЛУЧШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ 3D ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ЗРАЧКА И ВНЕШЕЙ ПЕРЕФЕРИИ

Благодаря стереоскопической технологии HEINE.





# ДИАГНОСТИРОВАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТО, ЧТО ВИДИШЬ

**Высокоточная диагностика вплоть до самых краёв периферии глазного дна**

- ▶ Значительно более качественная диагностика благодаря уникальной системе visionBOOST – даже запущенных стадиях катаракты
- ▶ Максимально чёткое изображение глазного дна благодаря продуманной оптике из стекла
- ▶ Яркое и равномерное освещение глазного дна с реалистичной цветопередачей благодаря LED<sup>HQ</sup> — теперь с ещё более естественными цветами
- ▶ Лучшее 3D-изображение благодаря стереоскопической технологии HEINE
  - Для расширенных и нерасширенных зрачков
  - Также для недоношенных детей и младенцев

**МЕНЬШЕ – ЭТО БОЛЬШЕ.  
МЕНЬШЕ КАБЕЛЕЙ.  
МЕНЬШЕ КНОПОК.  
МЕНЬШИЙ ВЕС.**

**Самый лёгкий непрямой офтальмоскоп премиум-класса всех времён.**

- ▶ Наивысший комфорт при использовании
- ▶ Индивидуально настраиваемая посадка
  - Эргономичное расположение всех элементов контроля и управления
  - Регулируется для правой и левой
  - Функция откидывания блока оптики (flip-up) для более комфортного взаимодействия с пациентом



# ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ HEINE НЕ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В ГОДАХ, А В ДЕСЯТИЛЕТИЯХ.

Надёжная инвестиция благодаря стабильной  
обработке

- ▶ Не требующая технического обслуживания ,  
пыленепроницаемая оптика
- ▶ Легендарная долговечность HEINE
  - Оптика надёжно закреплена на алюминиевой  
раме
  - Высококачественные материалы
  - 100% сделано в Германии
  - Уникальный контроль температуры LED<sup>HO</sup>
- ▶ 5-летняя гарантия на материалы, обработку и  
конструкцию

Подробности на [www.heine.com/de/service-support/garantiebedingungen](http://www.heine.com/de/service-support/garantiebedingungen)

## ПРОСТАЯ И ГИГИЕНИЧНАЯ ОБРАБОТКА.

Благодаря SmoothSURFACE

- ▶ Никаких отверстий
- ▶ Встроенная электроника
- ▶ Щиток безопасности OMEGA 600

 **HealthCare**

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ  
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792

# ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ



**OMEGA 600 непрямой офтальмоскоп**  
(с батареей и окуляром +2D), E4-USBC, окуляр 0D\* [01] C-008.33.610

**CC1 Зарядный кейс** [02] X-000.99.091

**CB1 Аккумулятор** [03] X-007.99.687

**E4-USBC Сетевой адаптер с кабелем** [04] X-000.99.300

**CW1 Настенное зарядное устройство** [05] X-095.17.320

**TM2 Обучающее зеркало** [06]] C-000.33.212

**Кейс для OMEGA 600** [07] C-080.00.000

**OMEGA 600 щиток безопасности – 1x** [08] C-000.33.018

**OMEGA 600 щиток безопасности – 3x** C-000.33.019

**OMEGA 600 Набор с настенным зарядным устройством:**  
Непрямой офтальмоскоп (с аккумулятором и +2D окуляром), E4-USBC, 0D окуляр\*, CW1 настенное зарядное устройство C-008.33.612

**OMEGA 600 с кейсом:**  
Непрямой офтальмоскоп (с аккумулятором и +2D окуляром), E4-USBC, 0D окуляр\*, кейс C-008.33.613

**OMEGA 600 студенческий набор:**  
Непрямой офтальмоскоп (с аккумулятором и +2D окуляром), E4-USBC, 0D окуляр\*, TM2 Обучающее зеркало, кейс C-008.33.614

**Зарядный набор OMEGA 600:**  
CC1 Зарядный кейс, CB1 аккумулятор X-000.99.090

\* **Окуляры:** чтобы адаптироваться к Вашему зрению, Вы можете заменить изначально установленные окуляры +2D на нейтральные линзы 0D (входят в комплект поставки).

## Три возможности зарядки аккумулятора



E4-USBC Сетевой адаптер с кабелем [04]




CW1 Настенное зарядное устройство [05]



CC1 Зарядный кейс [02]



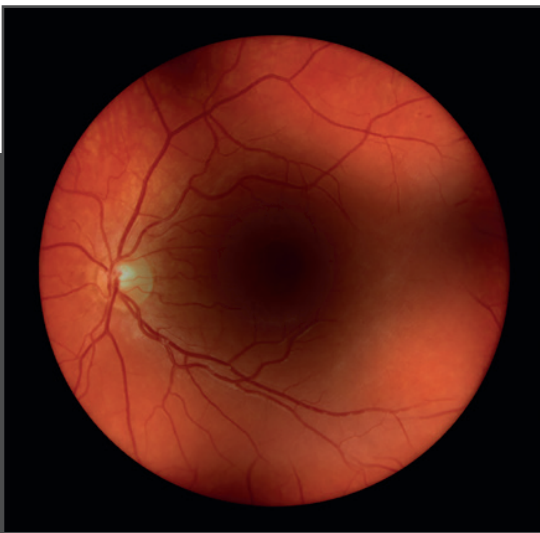

Обычный вид сетчатки через катаракту\*.



Вид сетчатки через катаракту с помощью системы visionBOOST\*.

## ВИДЕТЬ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ВИДНО

До сих пор при помутнении оптических сред в передней части глаза, например при катаракте, сетчатку можно было рассматривать лишь очень ограниченно или вовсе никак.

**Уникальная система visionBOOST улучшает обзор сетчатки пациента до 20%.**



Почти у всех исследованных пациентов данная функция при наличии катаракты привела к улучшению зрения. В принципе, это имело место для всех подтипов катаракты (ядерной/кортикальной/задней по классификации LOCS III).

В случае хорошо очерченных, более сильных и небольших помутнений (начинающаяся кортикальная/задняя катаракта) обзор заметно улучшался при исследовании соответствующей области глазного дна, которая была закрыта. Очень мелкие помутнения почти полностью исчезли благодаря увеличению яркости.

В случае преимущественно ядерного склероза функция BOOST приводила к более резкому и насыщенному изображению.

**Д-р Винтергерст, Университетская глазная клиника г. Бонн, Германия.**

\*Иллюстрации приведены для примера, результаты могут варьироваться от пациента к пациенту.



# КАЧЕСТВО made in GERMANY.

Над нами, немцами, многие посмеиваются за нашу дотошность и внимание к деталям. Но за это нас любят миллионы врачей!

Являясь ведущим мировым производителем инструментов первичной диагностики с более чем 500 сотрудников, HEINE Optotechnik уже более 75 лет является семейной компанией, руководство которой на 100% находится в руках владельцев. Мы продолжим разработку и производство инструментов HEINE на наших производственных предприятиях в Германии, где мы сочетаем многолетний опыт и мастерство с новейшими технологиями производства.

Если есть что улучшить в наших инструментах, неважно что, мы это улучшаем. И с этой дотошностью, стремлением к совершенству и высочайшему качеству мы производим и нашу продукцию.

Что означает качество HEINE для наших клиентов?

Качество — сегодня один из самых избитых терминов в маркетинге. Но вместо того, чтобы просто говорить об этом, мы живём качеством. Во всем, что мы делаем. В каждом продукте, который мы производим. В каждой линзе, которую мы шлифуем. В каждом винтике, который мы затягиваем. В каждом оптическом волокне, которое мы связываем. Всегда. Каждый день.

О долговечности наших инструментов теперь ходят легенды. И это неудивительно: ведь каждый отдельный инструмент является результатом десятилетий разработок, постоянного совершенствования и 100% контроля качества на нашем производстве. Где мы тщательно следим за тем, чтобы наши высокие идеалы в отношении качества были соблюдены.

Таким образом мы гарантируем, что наше требование к нашим продуктам премиум-класса, а именно обеспечение «самой точной и ранней диагностики», также будет выполнено. Не больше. Но и не меньше, никогда.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland  
Тел.: +49 8105 77280 | Факс: +49 8105 7728202 | E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)  
ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия  
Уполномоченный авторизованный импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.  
Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtexst@yandex.ru](mailto:medtexst@yandex.ru)

