

Гигиеническая обработка

Зарядный кейс HEINE CC1 и настенное зарядное устройство CW1

Общие предупреждения и информация по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



ПРИМЕЧАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	Следующая информация о гигиенической обработке должна применяться в соответствии с национальными стандартами, законами, руководствами и рекомендациями. Описанные меры гигиенической обработки не заменяют действующих правил компании.
	В случае подозрения на загрязнение провести гигиеническую обработку прибора. Компания HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только рекомендованные здесь средства и методы. Гигиеническая обработка должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя применяемого средства обработки. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора. Перед очисткой необходимо отключить прибор от источника питания.
	Помещайте в зарядное устройство только обработанные устройства. Убедитесь, что прибор полностью высох после обработки, прежде чем использовать его снова.
Ограничения при обработке	Периодически проверяйте целостность устройства.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany
E-Mail: info@heine.com • www.heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия
Уполномоченный авторизованный импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.
Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru



Дезинфекция салфетками

1. Ручная очистка и дезинфекция



- Обратите внимание на то, чтобы все загрязненные поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени обработки, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания и/или количество салфеток.

Оснащение

- Дезинфицирующие салфетки: спиртовые (например, Инцид Н или универсальные салфетки Микрозид) или спиртовые + четвертичные аммониевые соединения (например, Super Sani-Cloth)
- Если вы используете не рекомендованные средства для обработки, убедитесь, что они не вспениваются.

Проведение

- Очистите и продезинфицируйте загрязненные поверхности вручную путем протирания.
- Особое внимание уделите труднодоступным участкам.
- Удалите остатки дезинфицирующего средства и насухо вытрите прибор в соответствии с требованиями производителя дезинфицирующего средства.
- Очищайте кабель и блок питания только при необходимости и только сухой тканью.

2. Контроль и тестирование функциональности



- Перед использованием проверьте правильность работы устройства. Не используйте прибор при наличии видимых признаков повреждения.

TTT HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com

Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany

E-Mail: info@heine.com • www.heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный авторизованный импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru

