

## Очистка оптических частей Вашего прибора HEINE

Загрязнение внешних оптических поверхностей, например, пыль или отпечатки пальцев, может привести к необходимости очистки. Примечание: Чистящие средства, содержащие растворители, могут разрушить пластиковые линзы или клей для линз.

### Процедура:

- Сначала осторожно удалите отставшие частицы сжатым воздухом или специальной оптической щеткой.
- Смочите чистый ватный тампон или специальную салфетку для очистки оптики (например, WHATMAN Lens Cleaning Tissue 105 или Tiffen Lens Cleaning Paper) и удалите излишки влаги с помощью чистого абсорбирующего материала:
  - Для первого этапа очистки: используйте воду.
  - Для маслянистых и жирных загрязнений: используйте слабый раствор моющего средства и дистиллированной воды (например, 5 капель в 10 мл).
- Всегда протирайте с легким нажимом, двигаясь от центра по спирали.
- Повторяйте спиральную протирку свежееувлажненными ватными тампонами или специальными салфетками до достижения желаемого результата.
- Удалите остатки чистящей жидкости сухим ватным тампоном или специальной салфеткой.



## HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com) • [www.heine.com](http://www.heine.com)

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия  
Уполномоченный авторизованный импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.  
Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtextst@yandex.ru](mailto:medtextst@yandex.ru)

