

Гигиеническая обработка HEINE EN200 / EN200-1

Общие предупреждения и информация о безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



УКАЗАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	<p>Необходимо соблюдать инструкции по гигиенической обработке, основанные на национальных стандартах, законах и директивах. Описанные меры по гигиенической обработке не заменяют конкретных правил вашего учреждения/отделения.</p>
	<p>В случае возможного загрязнения проведите гигиеническую обработку инструмента.</p> <p>Рукоятка не должна погружаться в жидкости.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только рекомендованные средства и методы.</p> <p>Гигиеническую обработку должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя по применяемым средствам обработки.</p> <p>Избегайте попадания жидкости в устройство.</p> <p>Описанные процедуры обработки представлены вместе с соответствующими совместимостями материалов. Обработка должна проводиться в соответствии с утвержденной процедурой.</p>
<p>Ограничения при обработке</p>	<p>Периодически проверяйте целостность устройства.</p>



Дезинфекция протиранием

1. Ручная очистка и дезинфекция



Обратите внимание, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени воздействия, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания.

Оснащение

- Чистящее средство, при необходимости: ферментативное (например, neodisher MediClean)
- Дезинфицирующее средство: спиртовые (например, Incides N), спиртовые + соединения четвертичного аммония (например, Super Sani-Cloth) или перекись водорода (например, салфетки PReempt Wipes)
- Если вы используете средства для обработки, отличные от рекомендованных, убедитесь, что они не пенятся.

Проведение

- При сильном загрязнении можно сначала протереть салфеткой, смоченной чистящим средством, а затем продезинфицировать дезинфицирующей салфеткой.
- Очистите и продезинфицируйте устройство вручную.
- Обратите особое внимание на труднодоступные места.
- Особенно тщательно протирайте поверхности, к которым прикасается пациент и пользователь.
- Удалите остатки и высушите устройство в соответствии с требованиями производителя дезинфицирующего средства.

2. Контроль и тестирование функциональности



- Проверьте устройство на наличие видимых загрязнений или износа и при необходимости повторно обработайте его или утилизируйте в случае неустраняемых загрязнений.
- Не используйте устройство при наличии видимых признаков повреждения или изнашивания.



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtexst@yandex.ru

