



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА

Уполномоченный импортер и дистрибьютор HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG в России




⌚ Сетевой адаптер HEINE E4-USB



 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Dornierstr. 6 · 82205 Gilching · Germany
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
MED 112712 2020-08-10





 Прочтите и следуйте этим инструкциям, сохраните их для дальнейшего использования.

Область применения

HEINE E4 USB предназначен для зарядки исключительно с помощью блоков питания HEINE USB. Может использоваться только квалифицированным медицинским персоналом в профессиональном медицинском учреждении.

Предупреждения и информация о безопасности

 **ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести. (Цвет фона – жёлтый, цвет переднего плана – чёрный).


 **NOTE!** Этот символ используется для информации по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию или ремонту, которая является важной, но не связана с опасностью.

Обзор продукта



E4-USB

Настройка

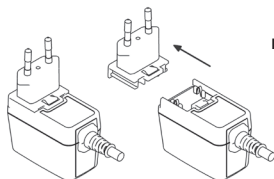

Первоначальная вилка:



ЕС



США/Япония



Великобритания




Австралия


Вилки сетевого адаптера блока питания взаимозаменяются, что позволяет работать по всему миру. Пиктограммы описывают процедуру их замены.

Подключите USB-кабель к прибору HEINE.

Разместите сетевой адаптер в таком месте, где он будет доступен и его можно будет легко отключить.

 После того, как вы проверили напряжение в сети, подключите импульсный сетевой адаптер к сети. При выводе прибора из эксплуатации действуйте в обратном порядке.

Зарядное устройство HEINE предназначено для установки в помещениях медицинского назначения вне зоны нахождения пациента (1,5 м). в соответствии с IEC 60601-1, (см. рисунок).

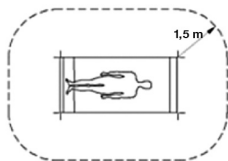

Гигиеническая обработка

Инструкция доступна:

- на сайте www.heine.com

- в бумажной версии, которую вы можете запросить по указанному адресу

Техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания.

Сервисное обслуживание

Устройство не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем.

Главные примечания

Гарантия на весь продукт аннулируется, если используются неоригинальные продукты HEINE или неоригинальные детали, а также если ремонт или модификация устройства производятся лицами, не уполномоченными HEINE. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.heine.com.

Ожидаемый жизненный цикл при нормальном использовании устройства и соблюдении предупреждений и информации по технике безопасности, а также инструкций по техническому обслуживанию составляет до 7 лет. По истечении этого периода продукт можно продолжать использовать, если он находится в безопасном и хорошем состоянии

Общие предупреждения

Перед использованием проверьте правильность работы устройства! Не используйте устройство, если видны признаки повреждения.

Не используйте устройство в пожаро- или взрывоопасных зонах (например, в насыщенных кислородом или анестезирующих средах).

Не модифицируйте устройство.

Используйте только оригинальные детали, запасные части, аксессуары и источники питания HEINE.

Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Устройство нельзя размещать рядом с сильными магнитными полями, т.е. аппараты МРТ.

Не используйте блок питания вне помещения.

Устройство нельзя использовать с удлинителями.

Источник питания одобрен для использования только с незаземлёнными нагрузками (Класс II).

Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному значению на сетевом адаптере.

Нагрев корпуса во время работы является нормальным и безвредным. Убедитесь, что устройство не накрыто во время работы, не находится в непосредственной близости от обогревателя и не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Используйте этот сетевой адаптер для питания устройств, для которых он предназначен.

Утилизация



Изделие должно быть утилизировано как отдельные электрические и электронные устройства.
Пожалуйста, соблюдайте соответствующие государственные правила утилизации.









Приложение содержит следующие таблицы

- Технические спецификации
- Объяснение используемых символов

Технические спецификации

Внешние условия для работы	От + 10 °C до + 35 °C От 30 % до 75 % относительная влажность От 700 ГПа до 1060 ГПа
Внешние условия для хранения	От + 5 °C до + 45 °C От 45 % до 80 % относительная влажность От 500 ГПа до 1060 ГПа
Внешние условия для транспортировки	от -20 °C до +50 °C от 45 % до 80 % относительная влажность от 500 гПа до 1060 гПа
Номинальное входное напряжение	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Потребляемая мощность	< 15 W
Выходное напряжение	5 V
Выходной ток	макс. 1.2 A

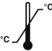Объяснение используемых символов

	Продукт соответствует Европейской директиве по медицинскому оборудованию 93/42/EEC.
	Каталог-номер или номер заказа
	Инструкции по использованию
	Производитель
	Дата производства
	Изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, вместо этого требуется отдельная утилизация в соответствии с местными нормами.
	Температурные ограничения в °C при хранении и транспортировке
	Температурные ограничения в °F при хранении и транспортировке
	Ограничения влажности при хранении и транспортировке
	Ограничения давления при хранении и транспортировке
	4004478 Соответствует стандарту ANSI/UL 60601-1 сертификат стандарту CAN/CSA C22. 2. № 601.1
	Уникальная идентификация устройствам
	Устройство класса защиты II
	Храните в сухом месте!
	Следуйте инструкциям по использованию!
	Только для использования в помещении.

HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com

Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru