



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА


Уполномоченный импортер и дистрибьютор HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG в России



Фотоадаптер HEINE SLR



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6 · 82205 Gilching · Germany
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
med 1512 2020-06-02

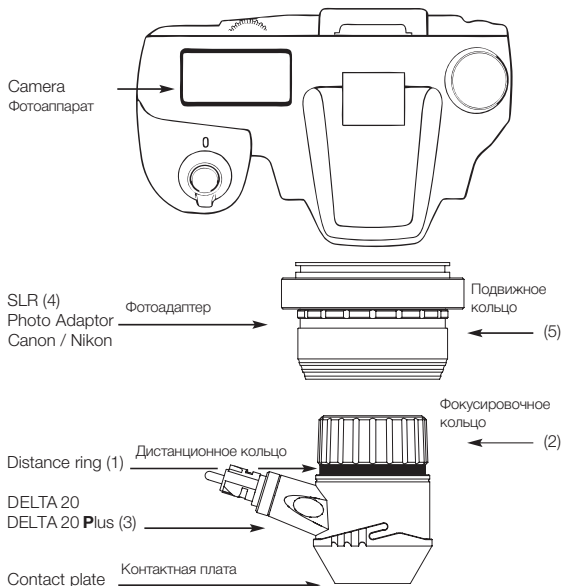

Фотоадаптер HEINE SLR



Пожалуйста, прочитайте и следуйте данным инструкциям по использованию фотоадаптера HEINE SLR для зеркальных фотокамер и сохраните их для дальнейшего использования.

Предупреждения и информация по безопасности



ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих инструкций может привести к возникновению опасных ситуаций (жёлтый фоновый цвет, чёрный цвет переднего плана).



ПРИМЕЧАНИЕ! Этот символ используется для информации по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию или ремонту, которая является важной, но не связана с опасностью.

Описание

Фотоадаптер HEINE SLR для HEINE DELTA 20 Plus и HEINE DELTA 20T был разработан и оптимизирован исключительно для быстрого и систематического документирования пигментных поражений и не заменяет медицинскую диагностику. Ни один диагноз не должен быть поставлен только на основании цифрового изображения.

Установка адаптера HEINE SLR на зеркальный фотоаппарат

Подключите фотоадаптер SLR HEINE к вашей цифровой камере. Поместите дистанционное кольцо (1) между устройством и фокусирующим кольцом (2). Поверните фокусирующее кольцо (2) по часовой стрелке до упора. Теперь вы получите оптимальный фокус. Затем присоедините дерматоскоп (3) к фотоадаптеру (4): Ручкой сдвиньте подвижное кольцо (5) фотоадаптера в направлении камеры и удерживайте его в этом положении. Другой рукой вставьте дерматоскоп в фотоадаптер до щелчка. Теперь отпустите подвижное кольцо (5) фотоадаптера; оно прочно соединяет камеру с дерматоскопом. Теперь дерматоскоп можно свободно вращать в фотоадаптере, однако его не следует снимать. После правильной настройки камеры можно приступать к съемке дерматоскопических изображений. Для того чтобы извлечь дерматоскоп из фотоадаптера, сдвиньте подвижное кольцо (5) фотоадаптера в сторону камеры и вытащите дерматоскоп.

Использование фотоадаптер HEINE SLR с HEINE DELTA 20 PLUS и DELTA 20T

Рекомендуемые настройки камеры и поддерживаемые модели камер можно найти в разделе: (www.heine.com Продукция / Дерматоскопы / Документы).
Инструкции по процедуре цифровой документации родник можно найти в разделе: (www.heine.com / Продукция / Дерматоскопы / Документы)

Размер изображения зависит от размера используемого датчика изображения. Глубина резкости может отличаться для разных моделей цифровых камер. В полнокадровой модели камеры (не рекомендуется), например, кольцо фокусировки также показано на изображении. Однако, разрешение достаточное для того, чтобы можно было увеличить изображение.

Очистка, дезинфекция и стерилизация

Для очистки фотоадаптера рекомендуется использовать сухую ткань. Дезинфекция и стерилизация не требуются, так как фотоадаптер не контактирует с пациентом. Не опрыскивайте устройство жидкостями.

Техническое обслуживание

Устройство не требует обслуживания.

Сервисное обслуживание

Устройство не имеет компонентов, обслуживаемых конечным пользователем

Технические данные

Тип байонета: NIKON (N), CANON (CN)

Общие замечания

Гарантия на весь продукт аннулируется, если используются неоригинальные продукты HEINE или неоригинальные детали, а также в случае ремонта или модификации устройства третьими лицами, не уполномоченными компанией HEINE. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.heine.com. Ожидаемый срок службы при нормальном использовании устройства и соблюдении предупреждений и правил техники безопасности, а также инструкций по обслуживанию составляет до 7 лет. По истечении этого срока изделие можно продолжать использовать, если оно находится в безопасном и хорошем состоянии

Общие предупреждения

Перед использованием проверьте правильность работы прибора! Не используйте прибор при наличии видимых признаков повреждения. Не модифицируйте прибор. Используйте только оригинальные детали HEINE, запасные части, принадлежности и источники питания. Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами.

Объяснение используемых символов

На устройстве или на упаковке используются следующие символы

	Номер по каталогу или ссылке
	Производитель
	Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. (Фон: синий, передний план: белый)
	Уникальная идентификация устройства



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792