

Гигиеническая обработка

Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA 600 и OMEGA 600 с проводом

Общие предупреждения и информация о безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



УКАЗАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	<p>Следующая информация о гигиенической обработке должна применяться в соответствии с национальными стандартами, законами, руководствами и рекомендациями. Описанные меры гигиенической обработки не заменяют действующих правил компании.</p>
	<p>В случае подозрения на загрязнение провести гигиеническую обработку прибора.</p> <p>Компания HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только рекомендованные здесь средства и методы.</p> <p>Гигиеническая обработка должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя применяемого средства обработки.</p> <p>Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.</p> <p>Перед очисткой необходимо отключить прибор от источника питания.</p>
	<p>Убедитесь, что прибор полностью высох после обработки, прежде чем использовать его снова.</p>
<p>Ограничения при обработке</p>	<p>Периодически проверяйте целостность устройства. ТМ: Макс. 50 циклов</p>



Дезинфекция салфетками

1. Подготовка

Выключите прибор и дайте ему остыть.
Извлеките ТМ (при наличии) и обработайте его отдельно.

2. Ручная очистка и дезинфекция



- Обратите внимание, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени воздействия, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания.
- Очищайте и дезинфицируйте оптические поверхности с помощью дезинфицирующей салфетки только в случае необходимости. В противном случае для удаления остатков используйте инструкцию „Очистка оптических частей ваших приборов HEINE“ (MED 234574.)

Оснащение

- Дезинфицирующие салфетки: спиртовые (например, Инцид Н или универсальные салфетки Микрозид) или спиртовые + четвертичные аммониевые соединения (например, Super Sani-Cloth)
- Если вы используете не рекомендованные средства для обработки, убедитесь, что они не вспениваются.

Проведение

- Очищайте и дезинфицируйте прибор вручную.
- Особое внимание уделите труднодоступным участкам.
- Тщательно протрите места соприкосновения: например, элементы управления, поворотные регуляторы, блокировочные элементы.
- Очистите подушечки оголовья с помощью салфетки, смоченной водой, или, при необходимости, дезинфицирующей салфеткой.
- Очистите и продезинфицируйте ТМ (при наличии) вручную с помощью спиртовой дезинфицирующей салфетки.
- Очищайте кабель и блок питания только при необходимости и только сухой тканью.
- Удалите остатки дезинфицирующего средства и насухо вытрите прибор в соответствии с требованиями производителя дезинфицирующего средства.

3. Контроль и тестирование функциональности



- Проверьте прибор на наличие видимых загрязнений или износа. При необходимости повторите обработку.
- Не используйте прибор при наличии видимых признаков повреждения.

4. Хранение

Храните его таким образом, чтобы он был защищен от повторного загрязнения, пыли и влаги.

HealthCare

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com

Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany
E-Mail: info@heine.com • www.heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия
Уполномоченный авторизованный импортер и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.
Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru

