


# Универсальный адаптер для смартфона к HEINE DELTA 30 и DELTAone. Цифровая дерматоскопическая документация с помощью камеры смартфона.

## ВОТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ!




1 С универсальным адаптером HEINE для смартфона вы можете использовать практически любой мобильный телефон, независимо от операционной системы (Android, Windows, ...). Для большинства моделей iPhone\* в ассортименте HEINE есть индивидуально подобранные чехлы, к которых адаптер уже надежно приклеен.

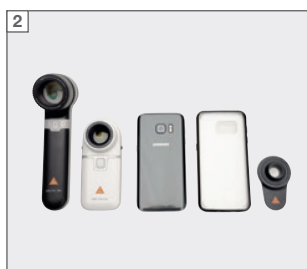

2 Итак, вам нужен DELTA 30 или DELTAone, адаптер и чехол\*\*, подходящий к вашему смартфону.



3 Адаптер подходит только для корпусов мобильных телефонов с гладкой поверхностью из твердого пластика; камера не должна выступать из корпуса.

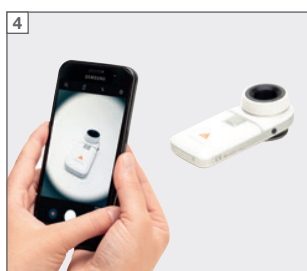

4 Если ваш смартфон имеет только одну камеру, закрепите разъем по центру перед этой камерой.

Если смартфон оснащен несколькими камерами, сначала следует проверить, какая из камер является основной: расположите разъем на задней панели смартфона так, чтобы объектив одной из камер находился в центре. Четко ли видно в поле зрения камеры объект съемки? Если все устраивает, поместите разъем перед этой камерой.



5 Снимите защитную пленку и плотно прижмите адаптер к центру объектива выбранной камеры.



6 Почти готово!



7 Теперь магнит адаптера удерживает мобильный телефон вместе с корпусом на фокусирующем кольце дерматоскопа.

\*Apple, логотип Apple и iPhone являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. HEINE рекомендует использовать iPhone версии 6 или выше. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

\*\*Смартфон и чехол-адаптер для мобильного телефона не входят в комплект поставки.





Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany

E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)

Tel: +49 151 15353792

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland**

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия**

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtextst@yandex.ru](mailto:medtextst@yandex.ru)

