

# HEINE iC1 Краткое руководство пользователя



Загрузите приложение HEINE DERM в AppStore.



Вставьте iPhone в подходящий чехол-адаптер до щелчка. Убедитесь, что камера находится в правильном положении.



Вставьте дерматоскоп HEINE iC1 в чехол-адаптер до щелчка.



Включите.



Устройство запускается в режиме поляризации. Функция переключения может использоваться для переключения между поляризационным и иммерсионным режимом.



Извлеките дерматоскоп HEINE iC1 из чехла-адаптера.



Выдавите iPhone из чехла-адаптера большим пальцем через углубление.



Зарядите HEINE iC1 с помощью прилагаемого USB-кабеля и сетевого адаптера.

# Очистка и дезинфекция



Обратите внимание, что дезинфицирующие и чистящие средства нельзя распылять непосредственно на контактную плату во избежание повреждения устройства.

Рекомендуемые чистящие средства для дерматоскопа: Neodisher® MediClean  
Рекомендуемые дезинфицирующие средства для дерматоскопа: четвертичные аммониевые соединения (например, салфетки Cleanisept® или салфетки Microbac®)

Рекомендуемые чистящие средства для контактной платы: Neodisher® MediClean  
Рекомендуемые дезинфицирующие средства для контактной платы: Четвертичные аммониевые соединения (например, Microbac® Tissues).

**TTT HealthCare**

Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany  
E-Mail: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com) • [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)  
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Garching | Deutschland  
Tel.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)  
ООО «МЕДТЕХНИКА-СТО.ЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия  
Уполномоченный представитель, импортер и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.  
Tel.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: [medtexst@yandex.ru](mailto:medtexst@yandex.ru)

