

Гигиеническая обработка Дерматоскопы HEINE® iC1 and NC2

Общие предупреждения и информация о безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



УКАЗАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	<p>Необходимо соблюдать инструкции по гигиенической обработке, основанные на национальных стандартах, законах и директивах. Описанные меры по гигиенической обработке не заменяют конкретных правил вашего учреждения/отделения.</p>
	<p>В случае возможного загрязнения проведите гигиеническую обработку инструмента.</p> <p>Контактные платы необходимо обрабатывать после каждого</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только рекомендованные средства и методы.</p> <p>Гигиеническую обработку должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя по применяемым средствам обработки.</p> <p>Избегайте попадания жидкости в устройство.</p> <p>Не допускайте попадания влаги в близи USB-разъема.</p> <p>Описанные процедуры обработки представлены вместе с соответствующими совместимыми материалами. Обработка должна проводиться в соответствии с утверждённой процедурой.</p>
<p>Ограничения по обработке</p>	<p>Периодически проверяйте целостность устройства. Контактные платы можно обрабатывать до 1000 циклов.</p>



Дезинфекция протиранием

1. Подготовка

Выключите устройство и дайте ему остыть. Отсоедините USB-кабель.

Снимите смартфон с чехлом-адаптером с дерматоскопа и обработайте смартфон и чехол-адаптер по отдельности. Снимите контактную плату с прибора и обработайте её отдельно. Снимите фильтрующую вставку или дополнительную линзу с контактной платы.

2. Ручная очистка и дезинфекция



Обратите внимание, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени воздействия, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания.

Оснащение

- Чистящее средство, при необходимости: ферментативное (например, neodisher MediClean)
- Дезинфицирующее средство: соединения четвертичного аммония (например, Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues или Sani-Cloth AF3)
- Для антивирусной дезинфекции: четвертичные аммониевые соединения (например, Mikrobac Virucidal салфетки)
- Убедитесь, что средство для обработки одобрено для использования с вашим смартфоном (например, универсальные салфетки MikroZid).

Проведение

- При сильном загрязнении можно сначала протереть салфеткой, смоченной чистящим средством, а затем продезинфицировать дезинфицирующей салфеткой.
- Очистите и продезинфицируйте дерматоскоп, адаптер для смартфона, чехол для крепления смартфона и сам смартфон вручную.
- Очистите и продезинфицируйте контактную плату отдельно вручную.
- Обратите особое внимание на труднодоступные места.
- Тщательно протрите участки, к которым прикасается пациент или пользователь: например, рабочие детали, элементы управления, поворотные регуляторы, элементы для блокировки.
- Для удаления дезинфицирующего средства и последующей сушки следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего средства.

3. Осмотр и функциональное тестирование



- Проверьте устройство на наличие видимых загрязнений или потёртостей. При необходимости повторите обработку. Утилизируйте, если загрязнения невозможно удалить.

4. Хранение

Храните таким образом, чтобы он был защищён от повторного загрязнения, пыли и влаги.



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортёр и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtexst@yandex.ru

